

Vejledning til kunder med gigt

For kunder med gigt, er det vigtigt at vide, at gigt ofte forårsager forandringer i leddene, bl.a. i fødderne. Af denne grund anbefales det regelmæssigt at få kontrolleret det ortopædiske fodtøj hos ortopædskomageren.

Eventuelle korrektioner og aflastninger i fodtøjet skal løbende tilpasses efter behov, således at man opnår det bedste resultat. Er man i tvivl om, hvor ofte denne kontrol skal finde sted, kan man henvende sig til ortopædskomageren.

Fodtøjet er et personligt hjælpemiddel som er konstrueret til dig og må ikke benyttes af andre.

I de fleste tilfælde er gradvis tilvænning nødvendig.

Fodtøjet skal jævnligt efterses for slid og repareres ved tydeligt tegn på slid. For stort slid kan medføre, at skoene ikke længere giver den optimale støtte.

Hvis der opstår synlige tegn på, at limninger har taget skade, bør skoene ikke benyttes, men omgående repareres.

Vær opmærksom på, at skoene til enhver tid skal være stabil og støtte korrekt. Er dette ikke tilfældet, kan det være tegn på forandringer i skoens materialer. Fodtøjet bør indleveres til eftersyn.

Fodtøjet bør behandles som alm. fodtøj med konkret anvisning på deres fodtøj.

Fodtøjet bør ikke udsættes for stærk varme.

Skoene bør kun tørres ved normal stuetemperatur.

Vi anbefaler, at fodtøjet imprægneres inden ibrugtagning.

Garantien følger gældende Dansk købelov. Garantien omfatter ikke almindelig slitage og bortfalder, såfremt defekt opstår som følge af misligholdelse, forkert brug eller pleje.

Garantien omfatter ikke almindelig slitage og bortfalder, såfremt defekt opstår som følge af misligholdelse, forkert brug eller pleje.

Hvis du er i tvivl er du altid velkommen til at kontakte HR2ortopædi.